



1



2



3



4



5



6

protect. PT soft

Назначение

protect.PT – корректирующий ортез для коленной чашечки. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения колена; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- Пателлофemorальный болевой синдром
- Хондропатия надколенника
- Ретропателлярный остеоартрит
- Послеоперационное или посттравматическое воспаление коленного сустава
- Нестабильность надколенника и коленного сустава

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Инструкция по наложению

- Откройте оба ремня.
- Согните ногу примерно на 45°. Проведите ортез над ногой (рис. 1).
- Следите за тем, чтобы коленная чашечка располагалась по центру специально предназначенного для нее углубления (рис. 2).
- Закройте оба ремня, начиная с верхнего (рис. 3) и заканчивая нижним (рис. 4).
- По возможности пройдите несколько шагов и еще раз проверьте правильность установки ортеза (рис. 5). При необходимости поправьте положение ортеза на ноге.
- Чтобы снять ортез, возьмите его сбоку за нижнюю часть и потяните вниз (рис. 6).

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застежки-липучки и удалите шарнирные шины. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием мощного средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

Полиамид, эластана, ПУ, полиэстер

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.